



Godkänt CE-klass EN 166 Flergångsvisir FV02-Face Visor



SPECIFIKATION

Svensktillverkat flergångsvisir enligt CE klass EN166 där varje visir är märkt med CE klass EN 166.

Permanent CE-godkännande EN166 från RISE som gäller i 5 år tom 2025.

Avsett att användas som ett heltäckande ansiktsskydd mot droppsmitta, stänk m.m.

Framförallt framtaget för personal som arbetar inom och med

- Patientnära sjukvård
- Hemtjänsten

TEKNISK INFORMATION

Stabilt välvt helvisir. Väl tilltaget så att även den som använder glasögon kan bära visiret. Stabil båge för för bästa passform.

Detta skyddsvisir är framtaget mot droppsmitta som ett flergångsvisir.

Visiret är testat och utvärderat* med RISE-metoden B2B FV01 1 S- EN 166 3S. Metoden är baserad på utvalda krav i EN 166: 2001 för Medicinsk skyddsutrustning, personligt ögon/ansiktsskydd.

* Testerna är utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB

Skyddsvisir tillverkat i Sverige och uppfyller krav ställda i SS-EN166.

Avsett för Flergångsbruk




B2B EN 166 3 S (Frame)
B2B 1 S (Ocular)
FV02-Face Visor

ANVÄNDNINGSBESKRIVNING

Detta Visir är enkelt att montera och ta på. Visiret anses kunna användas tillsammans med glasögon och munskydd.

Monteringen av visir:

1. Börja med att trycka ut de stansade delarna ur uttagen på linsen, pos. 2 (x3)
2. Montera bågen pos.1 i linsen pos. 3 genom att trycka i de grönmarkerade tapparna i uttagen på linsen.

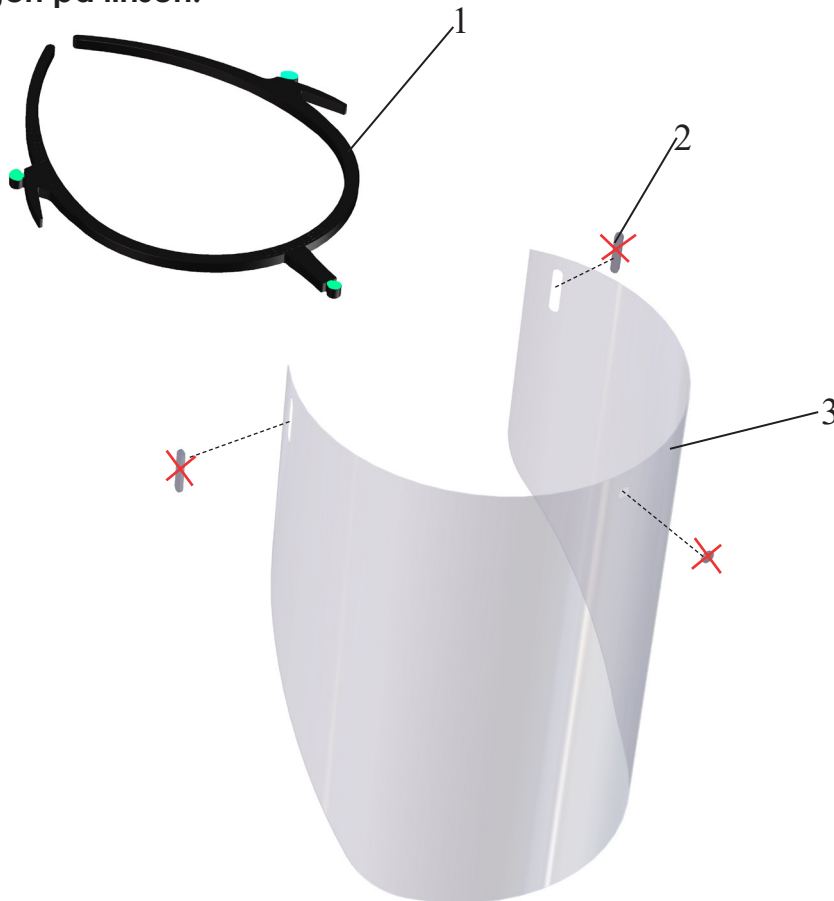

1. Båge
2. Stansade uttag x 3
3. Lins

Skötsel och underhållsanvisning

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Ta på skyddshandskar.
3. Desinfektera visirets delar med alkoholbaserad desinfektionsmedel med tensid.
4. Glöm inte att desinfektera insidan av visiret och tänk på att ta nytt material för desinfektion mellan utsida och insida.
5. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
7. Säkerställ en ren förvaring av rengjort visir. Förvara visiren så att den inte utsätts för yttre åverkan



Använd aldrig skadad eller repat visir.
Visiret får inte modifieras